


RIGENERAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IN FORMA STERILE

Software di tracciabilità

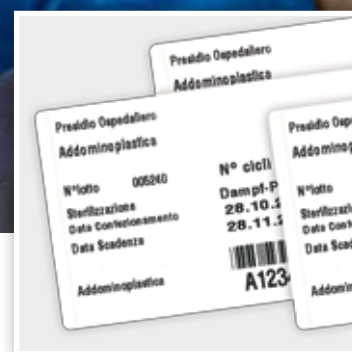

EFFICIENCY & SAFETY FIRST


| Premessa

Il Software è aperto, modificabile e adattabile alle esigenze di ogni singola realtà.

È di semplice utilizzo e di facile comprensione, con un MANUALE OPERATIVO sempre a disposizione.

| Obiettivi

- Tracciabilità per tutte le fasi del processo dei **Dispositivi Medici** sterilizzati sia per il Blocco Operatorio sia per i reparti.
- **Disponibilità immediata delle registrazioni effettuate.**
- **Verifica delle varie fasi operative: numeri cicli per singolo set, numeri cicli macchina, riconoscimento operatori.**
- Controllo scorte e scadenze, con gestione degli avvisi.
- Controllo e archiviazione report di Manutenzioni e Convalide.
- Statistiche e consultazioni.
- **Diminuzione utilizzo della carta**, con stampe dei cicli macchina in pdf e consultazioni immagini set confezionamento a video.
- Conformità Normative: **UNI 11408** e **ISO 13485**.

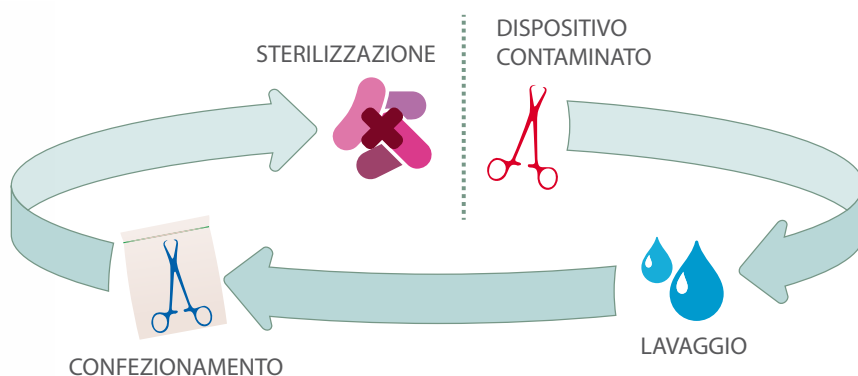


| Step operativi

	Test Macchina		Calendario
	Accettabilità		Difforme
	Lavaggio		Consultazione
	Imballaggio		Back Office
	Sterilizzazione		Back up
	Riconsegna		Help
	Tracciabilità e stampa		Esci



| Operatività

- Il software è composto da maschere per singola fase
- Ogni maschera offre all'operatore una guida semplice e rapida in ogni dettaglio
- Il sistema non permette di passare alla fase successiva se prima non è stato dato l'assenso alla fase precedente
- Ogni utente è abilitato tramite una propria e personale password

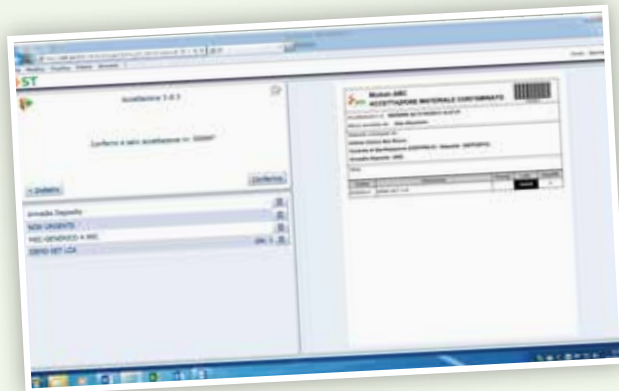

Il software garantisce un completo monitoraggio di tutte le fasi del processo di sterilizzazione; in particolare per ciascuna fase di lavorazione consente di registrare:

- L'operatore
- I parametri di processo
- I lotti dei materiali di consumo

Come riportato nel report finale di rintracciabilità per ogni lotto di sterilizzazione

| Etichetta

Al termine della fase di confezionamento, per ogni set processato l'operatore stampa un'etichetta adesiva (con fiches staccabili per apposizione sulla cartella clinica paziente) contenente i riferimenti del set, il lotto di sterilizzazione, la data di scadenza sterilità e il **numero di cicli di sterilizzazione subiti dal set**.





S.D.S. S.r.l.

Servizi di Sterilizzazione Convalida e Taratura

Sede di Urgnano

Via Ignazio Silone, 81
24059 Urgnano (BG)

Tel +39 035.41.83.179

Fax +39 035.48.71.644

Email: info@sdsconvalide.it

www.sdsconvalide.it

Sede di Spresiano

Via Galvani, 9/G
31027 Spresiano (TV)
c/o Centro Spresiano 2

Tel +39 0422.72.00.16

Fax +39 0422.87.62.03

www.sdsconvalide.it